

SCHEMA TECNICA
Ref. 05464 Cerotto Callifugo



IMMAGINE PRODOTTO

CODICE EAN: 8023766054645

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Cerotto Callifugo efficace contro calli, duri e occhi di pernice. Il cerotto è composto da un supporto di fissaggio e da un dischetto, che contiene il 40% di acido salicilico e favorisce la rimozione delle formazioni più ostinate senza dolore o fastidio. **La confezione contiene due diverse misure di dischetti e due formati di cerotto di fissaggio, combinabili fra di loro** in base all'estensione e alla tipologia dell'area da trattare. La combinazione fra cerotto di fissaggio e dischetto, esercita un'azione protettiva riducendo il fastidio provocato dallo sfregamento.

COMPOSIZIONE

Dischetto: 100% viscosa

Ingrediente attivo: acido salicilico 40%

Cerotto di fissaggio: TNT

Adesivo: acrilico

ISTRUZIONI PER L'USO

- Immergere la parte interessata in acqua tiepida per circa 10 minuti. Asciugare con cura.
- Rimuovere il dischetto della misura desiderata dal supporto trasparente ed applicarlo sulla parte da trattare. Se il dischetto è più grande del callo, ridurlo nella giusta misura, in modo da coprire solo la superficie da trattare. Applicare quindi il cerotto di fissaggio facendolo aderire bene.
- Cambiare il cerotto ogni giorno per 2/3 giorni.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DISCHETTI 9 pezzi: 6 pz 10 mm Ø; 3 pz 20 mm Ø

CEROTTO DI FISSAGGIO: 9 pezzi: 6 pz 42x20 mm; 3 pz 70x20 mm

CLASSIFICAZIONE: Dispositivo medico

AVVERTENZE

Non usare per lunghi trattamenti. Lunghi trattamenti potrebbero causare fenomeni di sensibilizzazione, in questo caso interrompere il trattamento. Non usare su pelle infiammata e su piccoli tagli o screpolature, o sulla pelle non interessata dal callo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Non riutilizzare. Il prodotto contiene lattice che può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Sospendere l'uso in caso di sensibilizzazione cutanea.

ETICHETTATURA AMBIENTALE

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECOGIDA SELECTIVA			
ASTUCCIO CAJA	SUPPORTO CEROTTO SOPORTE APÓSITO	BUSTA TRASPARENTE SOBRE TRANSPARENTE	SUPPORTO DISCHI SOPORTE DISCOS
PAP 21	PAP 22	PP 5	PET 1
CARTA / PAPEL		PLASTICA / PLÁSTICO	
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI			

