

**SCHEMA TECNICA**  
**Ref. 05462 Cerotto Vesciche Retro Tallone**



**IMMAGINE PRODOTTO**

**CODICE EAN:** 8023766054621

**CARATTERISTICHE PRODOTTO**

Cerotto idrocolloidale per la protezione delle vesciche doloranti. Favorisce la cicatrizzazione assorbendo il liquido contenuto nella vescica. Protegge da sporco e batteri, principali cause di infezione e può essere usato durante la doccia perché impermeabile. Protezione antiaderente.

**COMPOSIZIONE**

Cerotto idrocolloidale con rivestimento in PET

**ISTRUZIONI PER L'USO**

- Assicurarsi che la zona intorno alla vescica sia pulita, asciutta e priva di creme e/o oli.
- Dopo essersi lavati le mani, applicare il cerotto sulla vescica esercitando una lieve pressione assicurandosi che i bordi aderiscano bene alla pelle.
- Lasciare il cerotto applicato fino a completa cicatrizzazione.

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

5 pezzi:  
3 pz 25x68 mm  
2 pz 38x68 mm

**CLASSIFICAZIONE:** Dispositivo medico

**PRECAUZIONI D'USO**

Non applicare in caso di infezione. In caso di diabete consultare il medico prima dell'utilizzo.

**AVVERTENZE**

Non usare su pelle infiammata e su piccoli tagli o screpolature, o sulla pelle non interessata dalla vescica. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Non riutilizzare.

**ETICHETTATURA AMBIENTALE**

