

SCHEDA TECNICA

Ref. 05454 - CEROTTO PER DITA con PROTEZIONE BATTERIOSTATICA



IMMAGINE PRODOTTO

Mix di cerotti con tampone trattato con principio batteriostatico. La medicazione **mantiene sotto controllo il microambiente della ferita** bilanciandone il pH e **preserva dall'attacco degli agenti esterni** mediante una soluzione a base di esteri dell'acido lattico e del poliglicerolo lievemente ipertonica. Una volta rimosso, non lascia residui.

La confezione contiene:

- **6 Cerotti Classici 25x72 mm:** traspiranti e delicati sulla pelle, adatti in qualsiasi situazione.
- **4 Cerotti Aqua No Problem 25x57 mm:** impermeabili e indicati per un utilizzo al mare, in piscina o in doccia.
- **6 Cerotti Pelli Sensibili 19x72 mm:** indicati anche per le pelli più delicate, si rimuovono senza irritare la pelle.
- **4 Cerotti Dita 37x76 mm:** in tessuto elastico, aderiscono alle dita senza ostacolarne i movimenti.

La garza non contiene argento - che potrebbe provocare sensibilizzazione allergica - né antibatterici.

CODICE EAN

8023766054546

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Diversi formati e supporti di cerotti adesivi non sterili per la copertura di piccole ferite superficiali con tampone trattato con batteriostatico.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare le mani e applicare il cerotto con una leggera pressione sulla ferita pulita e su pelle asciutta. Durante l'applicazione evitare di toccare il cuscinetto centrale.
- Pulire la ferita e sostituire il cerotto quotidianamente.
- Usare su ferite superficiali.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

20 pezzi, formati: 6 pezzi 25x72 mm, 4 pezzi 25x57 mm, 6 pezzi 19x72 mm e 4 pezzi 37x76 mm.

CLASSIFICAZIONE

Dispositivo Medico

AVVERTENZE:

Conservare in un luogo fresco, asciutto e pulito. Dispositivo medico monouso. Non riutilizzare. Rischio di contaminazione. È consigliabile sostituire con frequenza la medicazione e rimuoverla con attenzione, per evitare l'insorgere di fenomeni avversi. Si consiglia di evitare l'utilizzo dei cerotti nella zona oculare, perioculare e a contatto con mucose.

SMALTIMENTO PACKAGING

RACCOLTA DIFFERENZIATA / RECOGIDA SELECTIVA			
ASTUCCIO CAJA PAP 21	INVOLUCRO ENVOLTORIO C/PAP 81 CARTA / PAPEL	CARTA PROTETTIVA PAPEL PROTECTOR C/PAP 81	SUPPORTO APPLICATORE SOPORTE APLICADOR LDPE 4 PLASTICA / PLÁSTICO

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI