



# Poltrona Reclinabile

con funzione di alzata assistita



GIADA  
Mod. H-5535C  
2 Motori

## Istruzioni d'uso

**GIADA Mod. H-5535C**  
**POLTRONA RECLINABILE**  
**con funzione di alzata assistita**  
**a 2 motori**

**CE RoHS**

## **ISTRUZIONI PER L'USO**

### **INTRODUZIONE**

Gentile cliente, ci complimentiamo per aver scelto la poltrona RECLINABILE a marchio AmiCasa.

Il prodotto è stato pensato non solo per regalarle dei piacevoli momenti di rilassamento, ma anche per agevolare l'assunzione della posizione eretta, attraverso la funzione di alzata assistita.

La preghiamo di leggere attentamente il manuale di istruzioni per capirne il funzionamento, prestando particolare attenzione alle norme inerenti la sicurezza. Lo conservi per future consultazioni.

## **SICUREZZA**

### **1. ATTENZIONE**

Montare correttamente la poltrona, seguendo le istruzioni contenute in questo manuale, fornito al momento dell'acquisto.

Produttori, agenti e distributori non risponderanno in caso di danni causati da montaggio e installazione scorretti, o da un eventuale uso improprio.

Posizionare la poltrona su una superficie che non presenti dislivelli, in un ambiente non umido o polveroso, onde evitare possibili problemi al motore interno o un corto circuito.

Non posizionare la poltrona in stanze con temperatura superiore a 40° C, vicino a caloriferi, stufe o luce solare diretta.

Non utilizzare all'aperto.

Quando la poltrona non è in uso, staccare la spina dalla corrente elettrica al fine di evitare un surriscaldamento.

Non appoggiare alcun oggetto sui braccioli, sul poggiapiedi o sullo schienale della poltrona.

Non saltare o giocare sulla poltrona.

**IL PRODOTTO NON E' IDEATO PER L'IMPIEGO DA PARTE DEI BAMBINI.**

Controllare che la tensione elettrica corrisponda alle caratteristiche indicate nelle istruzioni.

Utilizzare su un impianto elettrico a norma di legge.

Non connettere o disconnettere la spina dalla presa elettrica con le mani umide o bagnate.

Sfilare la spina dalla presa elettrica, tenendo con la mano la spina stessa e non il filo.

Non mettere il filo dell'adattatore sotto la poltrona: la corda potrebbe danneggiarsi e causare un corto circuito.

Non lasciare il filo appeso alla poltrona e non usarla se il filo è danneggiato.  
Se necessario, far sostituire il cavo elettrico, con uno identico, da un tecnico qualificato.  
Non toccare la spina subito dopo l'uso, potrebbe essere molto calda.  
Non toccare i filocomandi con le mani bagnate, oggetti affilati o pesanti. Evitare di farli cadere o urtarli.  
Non calpestare o posizionare oggetti pesanti sopra il filo del filocomando.  
Non mettere le mani tra il sedile e il poggiapiedi quando la poltrona si reclina o quando torna in posizione seduta.  
Utilizzare la poltrona seguendo scrupolosamente le istruzioni contenute all'interno della confezione.  
Il prodotto non è indicato per un uso professionale.

Nota: tutte le riparazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato o dal Servizio Assistenza del negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

## PRECAUZIONI

Nel caso in cui la poltrona sia stata riposta in una stanza fredda per poi essere utilizzata in un luogo caldo, è consigliabile avviarla un'ora più tardi; questo perché le sue prestazioni non possono essere ottimali se vi è presenza di umidità sulle parti meccaniche. Nel caso in cui venisse utilizzata in un luogo riscaldato improvvisamente, potrebbero insorgere dei problemi al motore.

## 2. CHI NON DOVREBBE UTILIZZARE IL PRODOTTO

Chi soffre dei seguenti problemi, dovrebbe consultare il proprio medico prima di usare la poltrona:

- persone sotto cure mediche, con febbre alta o che si sentono indisposte;
- persone che soffrono di malattie cardiache;
- donne in gravidanza;
- persone con anomalie spinali causate da incidente o malattia.

Nota: questa poltrona non è stata progettata per bambini.

### QUANDO INTERROMPERE IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO


Qualora si presentino i seguenti casi, è necessario disconnettere immediatamente la spina dalla presa elettrica e contattare il servizio assistenza:

- se la poltrona viene accidentalmente bagnata potrebbe verificarsi un corto circuito;
- se la tappezzeria è lacerata ed il meccanismo interno è esposto;
- se c'è una riduzione improvvisa della potenza elettrica (potrebbero verificarsi danni se questa viene ripristinata improvvisamente);
- se si creano scintille.

Nota: controllare regolarmente lo stato della tappezzeria.

## MONTAGGIO

La poltrona è piegata su se stessa e comprende schienale e sedile.  
Assemblare la poltrona seguendo le istruzioni presenti nel foglio illustrativo.

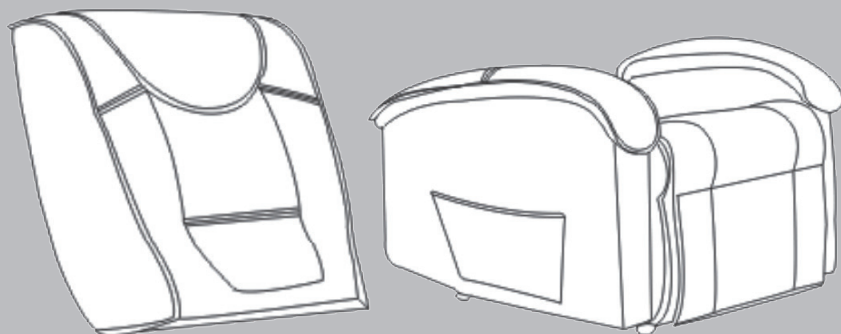

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Nota: non montare la poltrona se alcune sue parti o la tappezzeria sono danneggiate. Controllare attentamente tutti gli elementi prima di passare alla fase di montaggio. Per qualsiasi problema rivolgersi al venditore. Assicurarsi che tutti i fili siano connessi correttamente.

### FILOCOMANDO PER ALZATA ASSISTITA

In questa versione dotata di 2 motori, le movimentazioni di schienale e poggiatesta sono indipendenti.



## POSIZIONAMENTO



Lasciare spazio sufficiente di fronte e dietro alla poltrona per permetterle di reclinarsi.

Assicurarsi che ci siano almeno 65 cm dietro alla poltrona e almeno 40 cm di fronte ad essa.

Posizionare in un luogo asciutto e verificare che il pavimento non abbia dislivelli.

Una volta che la poltrona è assemblata come da manuale di istruzioni, posizionarla su una superficie piatta e in un luogo asciutto.

La poltrona ora è pronta per essere utilizzata.

### PRECAUZIONI

Assicurarsi che non ci sia alcuna ostruzione dietro o di fronte alla poltrona, al fine di poter permettere a questa di reclinarsi e alzarsi liberamente.

Non infilare oggetti o mani tra la poltrona ed il poggiatesta.

### MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

1. Se la poltrona dovesse rimanere inutilizzata per un lungo periodo, è indicato, dopo aver rimosso polvere e sporcizia, coprirla per proteggerla. Si consiglia di riporla in un luogo asciutto, evitando la luce diretta del sole o gli ambienti con temperature elevate onde prevenire un possibile scolorimento della tappezzeria.

2. Prima di effettuare la pulizia assicurarsi che l'interruttore principale sia spento e rimuovere la spina dalla rete elettrica.

3. Per pulire le parti in plastica, il tubo e la tappezzeria della poltrona, è possibile utilizzare del sapone delicato, facendo attenzione a rimuoverlo con un panno asciutto. Non usare detersivi che contengano benzene o sostanze simili poichè potrebbero scolorire e graffiare il tessuto. La tappezzeria non deve essere rimossa e non è stirabile.

4. Per la pulizia del telecomando, usare solo panni asciutti: l'uso di un panno bagnato potrebbe danneggiarlo.

### PRECAUZIONI

Nel caso in cui i filocomandi non funzionino correttamente, si consiglia di contattare il fornitore. Nel caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi a un professionista per la sua riparazione.

## **GARANZIA**

Il prodotto è garantito per un periodo di due anni.

Conservare il documento d'acquisto come data di partenza della garanzia.  
Rimangono esclusi dalla garanzia danni dovuti al mal utilizzo del prodotto,  
non rispettando quanto dettagliatamente scritto nel manuale d'uso.

**CE RoHS**

